


# ALLES SPÜLT

## ANLEITUNG ZUM PCR-TEST IN DER SCHULE

[www.bmbwf.gv.at/allesspuekt](http://www.bmbwf.gv.at/allesspuekt)

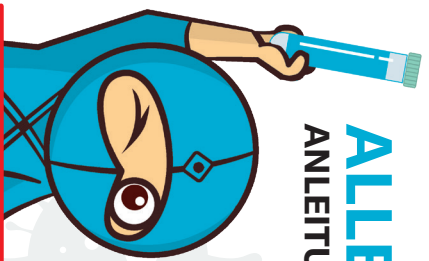

**WICHTIG**  
30 MINUTEN VOR DEM TEST NICHT  
ZÄHNE PUTZEN, KAUGUMMI KAUFEN,  
TRINKEN, ESSEN ODER RAUCHEN.


TESTRÖHRCHEN  
MIT LÖSUNG




QR-CODES



SCHUTZBEUTEL

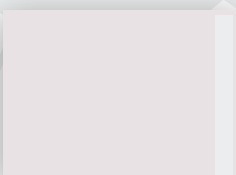

**SICHERE SCHULE**  
[www.sichereschule.at](http://www.sichereschule.at)


 Bundesministerium  
Bildung, Wissenschaft  
und Forschung

**COVID-19 NACHGEWIESEN**  
DIE SCHULE INFORMIERT DIE SCHÜLERIN/  
DEN SCHÜLER, DIE ELTERN/  
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND DIE  
ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.


**COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN**  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN  
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!




- Öffne das Teströhrchen
- Leere die Flüssigkeit in den Mund
- Spüle die Flüssigkeit 30 Sekunden im gesamten Mundraum im Kreis

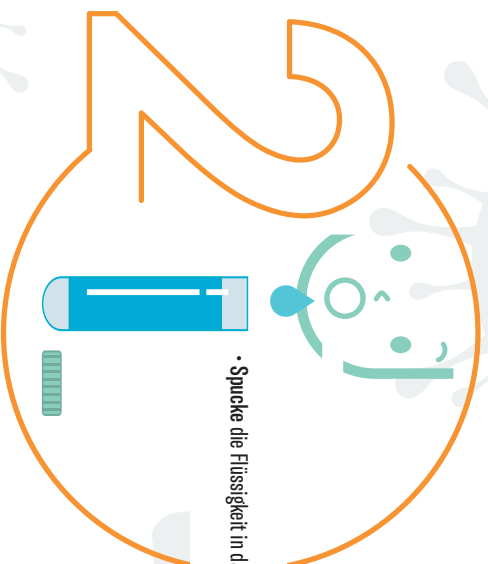


- Spucke die Flüssigkeit in das Teströhrchen

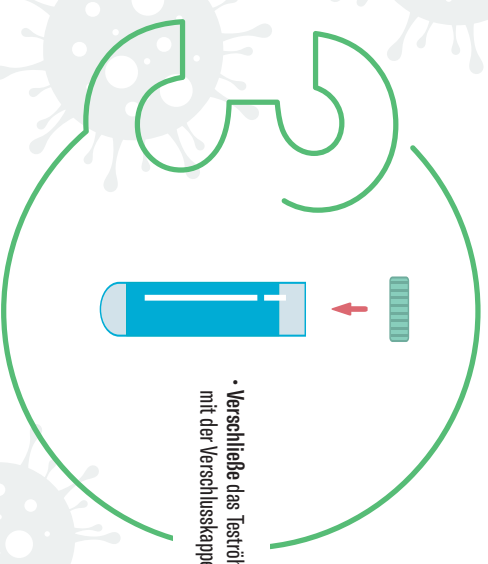


- Verschiebe das Teströhrchen mit der Verschlusskappe

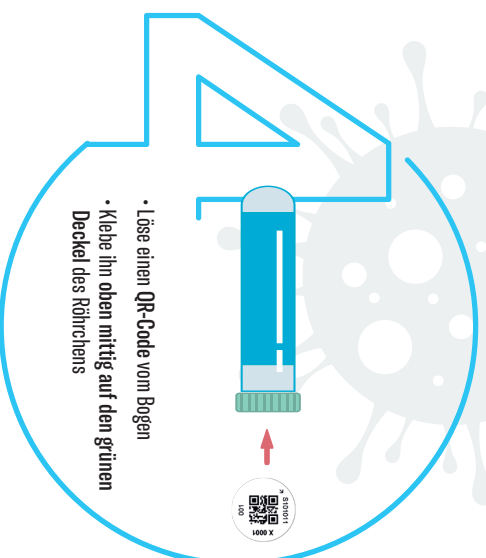

- Löse einen QR-Code vom Bogen
- Klebe ihn oben mittig auf den grünen Deckel des Köhrchens

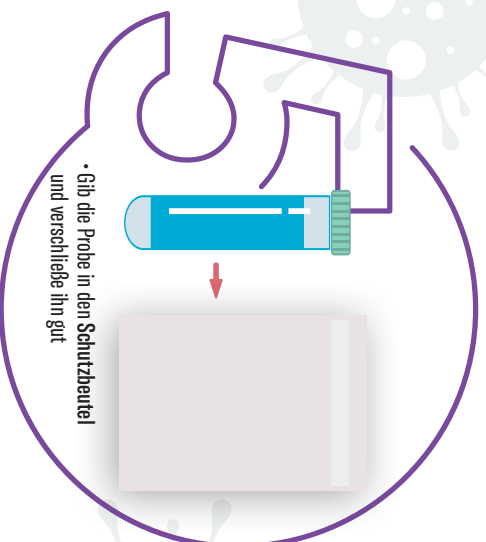

- Gib die Probe in den Schutzbeutel und verschleße ihn gut

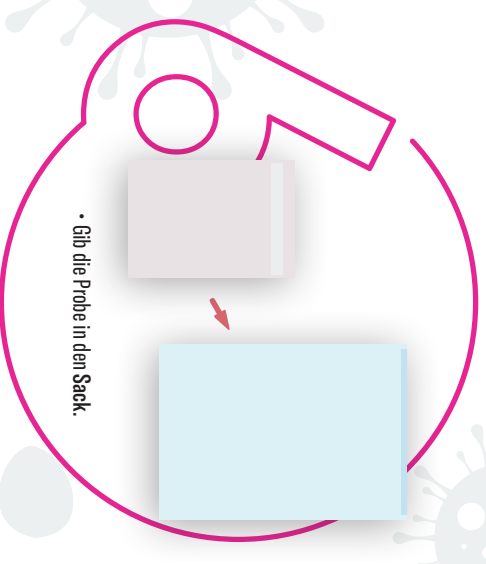

- Gib die Probe in den Sack.